


Aerodesin[®] 2000

Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

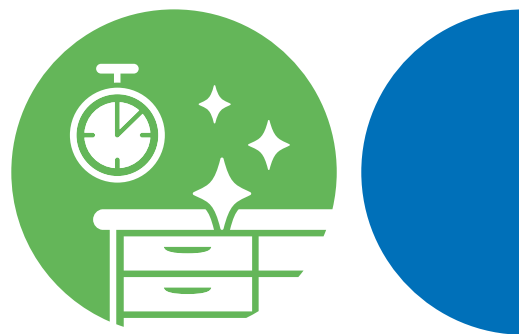

PODSTAWOWE CECHY

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-; drożdżako-; prątko- i wirusobójcze (Polio, Adeno i Noro)
- czas działania: min. 1 min.
- zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholi
- dopuszczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- szybko schnie pozostawiając przyjemny i delikatny zapach

INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.
Preparat gotowy do użycia - nie rozcieńczać!
Dezynfekcja powierzchni czystych.

1. Powierzchnie równomiernie pokryć preparatem (zużywając max. 50 ml/m²) przez rozpylanie lub za pomocą nasączonej ściereczki (zalecane jednorazowe chusteczki włókninowe Medilab). Rozpylać z odległości ok. 30 cm na dezynfekowaną powierzchnię. Jednorazowo dezynfekować maksymalnie 2 m² powierzchni.
2. UWAGA: nie stosować na materiały wrażliwe na alkohol (np. pleksi, powierzchnie lakierowane, bejcowane).
3. Nie używać w pobliżu źródeł ognia, nie nanosić na urządzenia podłączone do prądu.
4. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością po wykonanej procedurze dezynfekcyjnej należy dodatkowo zmyć wodą zdatną do picia.

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera:
propan-1-ol (325 mg/g); etanol (180 mg/g),
aldehid glutarowy (1 mg/g)

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:
bakterio-; drożdżako-; prątkobójcze - 1 min.
oraz wirusobójcze wobec: HCV, Corona (Vaccinia), Adeno, Noro - 30 sek.; HIV, HBV, Polyoma SV 40 - 1 min.; Polio - 60 min.

OPAKOWANIA

Aerodesin[®] 2000: butelka - 1 L ze spryskiwaczem
Aerodesin[®] 2000: kanister - 5 L

Wyposażenie dodatkowe:

jednorazowe chusteczki włókninowe

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna - opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2312-04

WYTWÓRCA:

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str 133
12247 Berlin • Niemcy
lysoform.de