



OSTRZEŻENIE

Przed użyciem wyrobu należy uważnie przeczytać *instrukcję obsługi*.

Instrukcja obsługi

Urządzenia do usuwania zszywek

STERILE EO



CE 0123

2/A

5. Obsługa



- a. Wprowadzić przednią część dolnego noża przyrządu pod spód zszywki.



- b. Zaciśnąć mocno górną rączkę i dolną rączkę do ich całkowitego zamknięcia. Następuje wygięcie zszywki.



- c. Zdjąć całkowicie odgiętą zszywkę pionowo z powierzchni skóry.

6. Uwaga:

- a. Przyrządu może używać wyłącznie profesjonalny personel medyczny posiadający stosowne zaświadczenia medyczne.
- b. Przyrząd nie może ulec zanieczyszczeniu po wyjęciu z opakowania. W przypadku uszkodzenia opakowania stosowanie przyrządu jest zabronione.
- c. Przyrządu do usuwania zszywek skórnych nie należy stosować po upływie terminu ważności

1. Budowa

Metalowy element przyrządu jest wykonany z 1Cr 18Ni9Ti, natomiast rączka przyrządu jest wykonana z tworzywa ABS.

2. Zasada działania

Po ściśnięciu rączki, przez siłę zewnętrzną, górny nóż przyrządu do usuwania zszywek wywiera nacisk na środku zszywki, która znajduje się na dolnym nożu przyrządu. W wyniku mechanicznego działania każdej z części dwa końce zszywki są odginane w górę i wyciągane ze skóry. W ten sposób następuje usuwanie zszywek.

3. Właściwości

- a. Metalowe elementy przyrządu do usuwania zszywek skórnych wykazują odpowiednie właściwości antykorozyjne.
- b. Przyrząd do usuwania zszywek skórnych jest poddawany sterylizacji tlenkiem etylenu. Przed wypuszczeniem wyrobów z fabryki pozostałości tlenu etylenu powinny wynosić poniżej 10 mg/kg.

4. Miejsce aplikacji

Przyrząd do usuwania zszywek skórnych stosuje się do usuwania zszywek.

7. Przechowywanie i transport

Wyrób należy przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach o wilgotności względnej $\leq 80\%$ RH, w środowisku wolnym od żrących gazów.

Nie przechowywać pod innym ładunkiem. Obchodzić się z zachowaniem ostrożności.

8. Okres ważności

5 lat.

9. Usługi posprzedażowe

Wszelkie skargi dotyczące jakości należy kierować do dostawcy lub producenta.

Manufacturer: Ningbo Advan Electrical Co., Ltd.
Address: Industrial Development Zone
Fuhai Town, Zhejiang Province
315332 Cixi City
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 86(21)34241733
Fax: 86(21)64691323
Website: <http://www.advan-china.com>

European Representative: CMC Medical Devices & Drugs S.L.
Address: C/Horacio Lengo no 18, CP 29006,
Málaga, Spain.